

Tenaza aretes Tagfaster Unitario

El aplicador TagFaster está diseñado para una colocación rápida, precisa y segura de aretes en animales. Su sistema con resorte permite una manipulación eficiente, reduciendo el esfuerzo y minimizando el riesgo de daño en la oreja del animal. Ideal para trabajos de marcación en campo.

Características Principales

- Aplicación de un arete por operación
- Sistema de liberación automática
- Uso frontal o posterior en la oreja
- Carga rápida y sencilla
- Diseño ergonómico para mejor agarre
- Reduce la fuerza necesaria durante el uso
- Compatible con aretes visuales y electrónicos

Usos Recomendados

- Marcación de crías
- Ganadería ovina
- Ganadería caprina

Beneficios

- Mayor eficiencia en el proceso de identificación animal
- Disminuye el estrés del animal
- Facilita el trabajo del operario
- Herramienta durable y confiable




Especificaciones Técnicas

- Tipo de producto: Aplicador de aretes
- Marca: TagFaster
- Material: Alta resistencia
- Mecanismo: Resorte integrado
- Origen: Fabricado en Reino Unido (UK)




Buenas prácticas de aplicación

- La retención es generalmente mayor cuando el arete se coloca en la mitad del camino hacia afuera de la cabeza, ya sea de frente o de revés; y cuanto más joven mejor.
- Se recomienda que el arete electrónico se coloque en la oreja izquierda.
- Aplique en condiciones aireadas, secas e higiénicas para reducir la posibilidad de infecciones.
- Aunque el arete contiene propiedades antibacterianas, se recomienda tratarlo con alguna solución antibacteriana para minimizar la probabilidad de infecciones.
- Asegúrese que el aplicador y los aretes estén limpios y almacénelos en un recipiente hermético para evitar los efectos de la humedad.
- Mantenga el arete en forma vertical al entrar en la oreja.

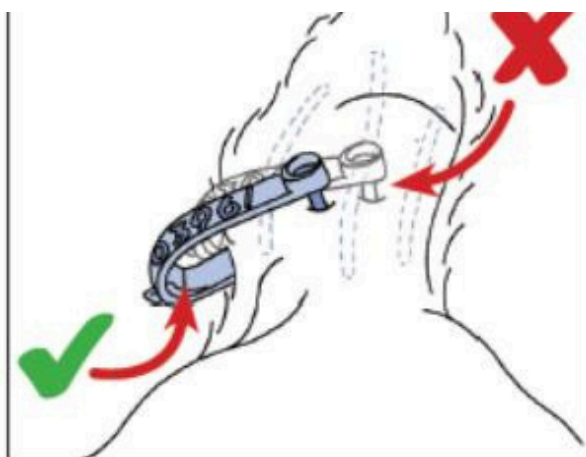

CUANDO SE COLOCA EN UN CORDERO PEQUEÑO, DEJE UN ESPACIO PARA EL CRECIMIENTO DE LA OREJA Y UBIQUE EL TAG A MITAD DE CAMINO HACIA AFUERA DE LA CABEZA

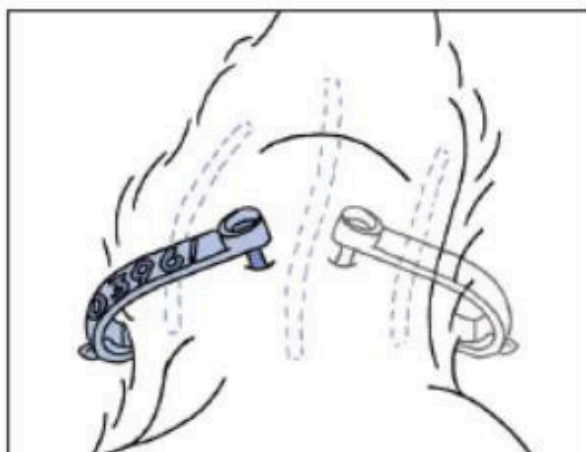

CUANDO COLOQUE EN UN CORDERO ADULTO, DEJE UN ESPACIO PARA EL CRECIMIENTO ADICIONAL Y UBIQUE EL TAG A MITAD DE CAMINO HACIA AFUERA DE LA CABEZA